

Руководство по эксплуатации

MELAprint[®] 42

принтер

Дорогой доктор!

Благодарим Вас за доверие, оказанное нам.

Уже около 55 лет компания MELAG специализируется в производстве стерилизационного оборудования для медицинских целей. За это время MELAG превратилась в передового производителя медицинской техники. Благодаря исключительному качеству наших стерилизаторов, во всем мире уже продано более 410000 единиц продукции MELAG, которая производится только в Германии.

Пожалуйста, перед тем, как начать эксплуатировать это устройство, внимательно прочитайте данное Руководство

Персонал и руководство MELAG.



Содержание

1	1 Установка устройства	3
1.1	1.1 Проверка комплектации оборудования.....	3
1.2	1.2 Подключение принтера.....	3
1.3	1.3 Интерфейс	4
1.4	1.4 Загрузка бумаги	4
2	2 Тестирование	5
3	3 Замена ленточного картриджа	5
4	4 Аксессуары и расходные материалы	6

1

1 Установка устройства

1.1 Проверка комплектации оборудования

Принтер MELAprint® 42 поставляется в следующей комплектации:

- Принтер (удостоверьтесь, что серийный номер на нижней части принтера совпадает с номером, указанным на упаковке)
- Рулон бумаги 1 шт.
- Лента для принтера (уже установлена) 1 шт.
- Электрический кабель
- Инструкция по применению

1.2 Подключение принтера

Вставьте электрический кабель с блоком питания в предназначенное для него гнездо на Вашем принтере (рис.1). **Важно:** Убедитесь в соблюдении полярности (рис.1). Принтер MELAprint® 42 может быть использован только с блоком питания 5 V. Рекомендуемый электрический кабель: MELAG артикул 01041.

Принтер MELAprint® 42 разработан для использования со следующими автоклавами MELAG: Vacuklav® 24-B, Vacuklav® 30-B, Vacuklav® 31-B, Euroklav® 29V-S, Euroklav® 29-S, Euroklav® 23V-S, и Euroklav® 23-S, Cliniklav 25.


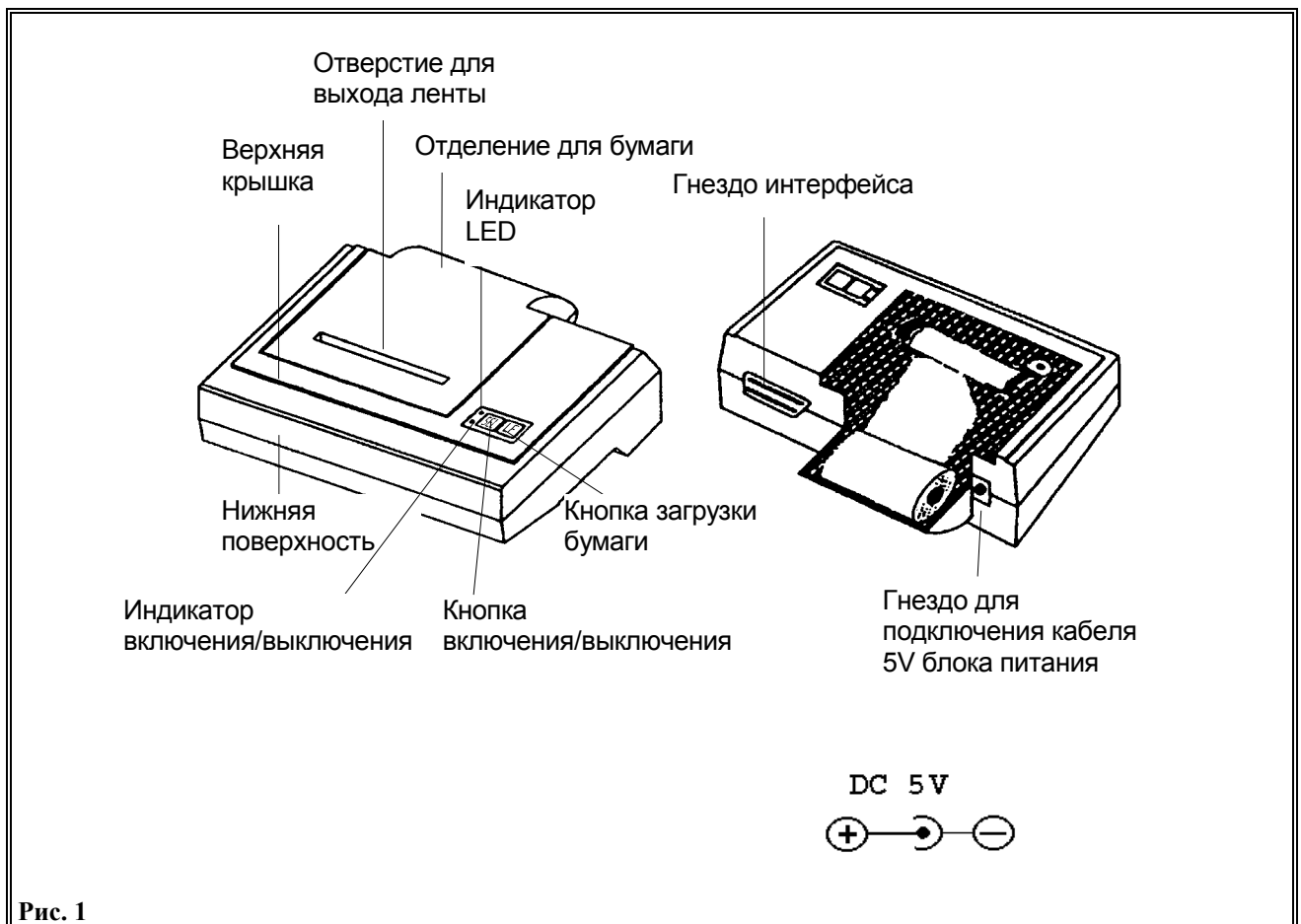


Рис. 1

1.3 Интерфейс


Подключите прилагающийся кабель принтера к гнезду интерфейса принтера MELAprint® 42 (рис. 1).

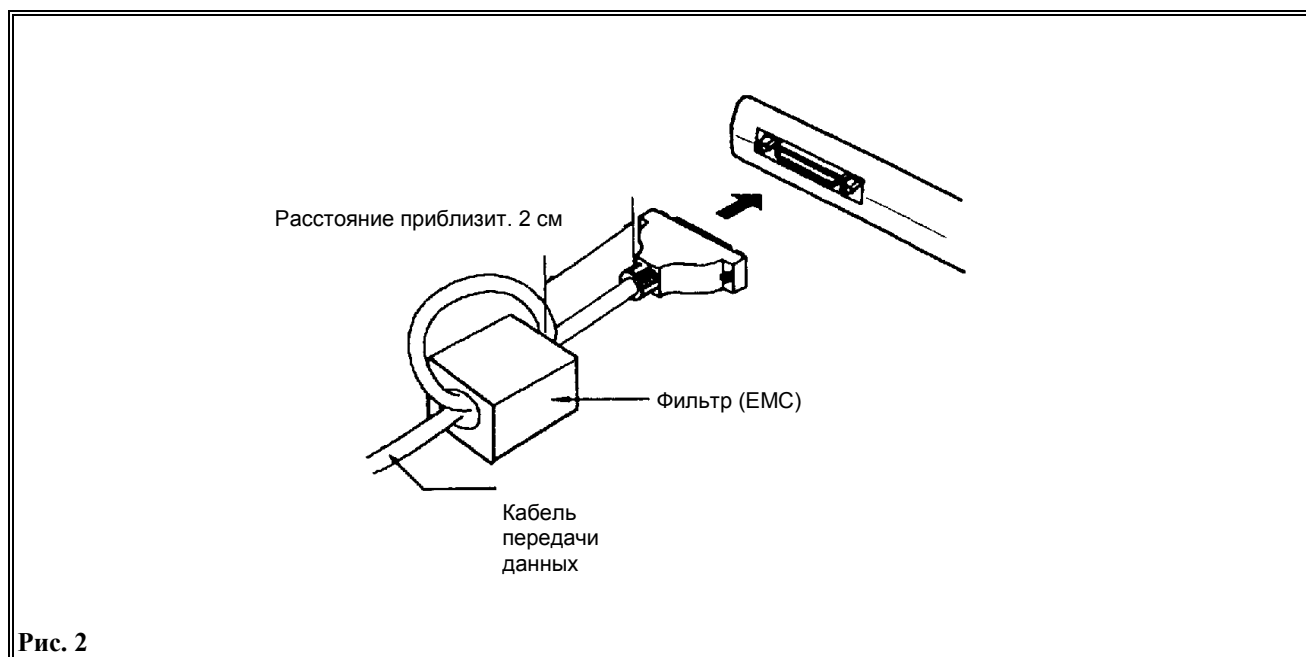

Подсоедините электромагнитный фильтр к кабелю передачи данных (рис. 2): сформируйте кольцо из кабеля на расстоянии приблизительно 2 см от гнезда подключения как показано выше. Затем используйте фильтр для фиксации кольца.

1.4 Загрузка бумаги

1. Пожалуйста, сдвиньте крышку отделения для бумаги в сторону задней панели (рис. 3).
2. Затем заправьте конец рулона бумаги в отверстие для бумаги в то же время удерживая кнопку LF (Загрузка линии) до тех пор пока конец бумажного рулона не покажется из верхнего отделения (рис. 4).
3. Будьте осторожны и проследите, чтобы бумага не оказалась замята между крышкой и печатающей головкой.
4. Наденьте рулон бумаги на цилиндрический держатель, и вставьте его назад в принтер.
5. Верните крышку отделения для бумаги в первоначальное положение. По окончании установки убедитесь, что конец бумажного рулона показался из отделения для бумаги.

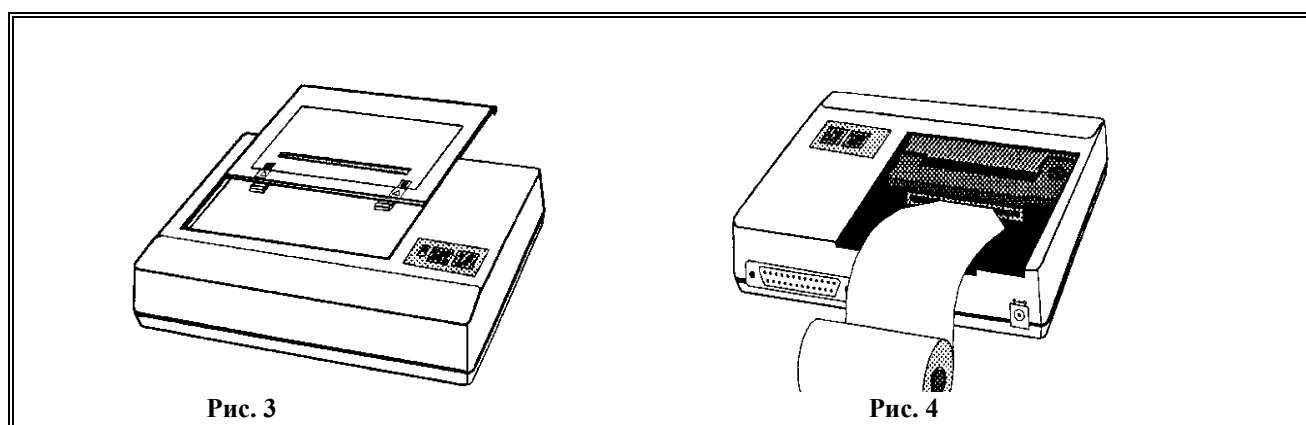

ВНИМАНИЕ!

Никогда не тяните бумагу через печатающий механизм. Всегда используйте кнопку LF для захвата бумаги. Протягивание бумаги через печатающий механизм приводит к раннему износу механизмов принтера.


2 Тестирование

Используйте функцию самотестирования, которая позволит Вам убедиться, что принтер функционирует нормально: нажмите и удерживайте кнопку SEL (рис. 1). В то же время, включите питание принтера. Принтер напечатает отчет о DIP установках и характеристиках принтера.


3 Замена ленточного картриджа

После продолжительного использования устройства, качество печати со старой лентой будет ухудшаться. Для замены ленты принтера, пожалуйста, сделайте следующее:

- Сдвиньте прозрачную крышку в направлении указанном стрелками (рис. 5).
- Извлеките старую ленту (рис. 6), слегка нажав пальцем на место на ленточном картридже обозначенном словом "PUSH". Легкое надавливание на картридж приведет к его поднятию с противоположной стороны и выходу из печатающего механизма. Вы можете с легкостью достать картридж путем поднятия.

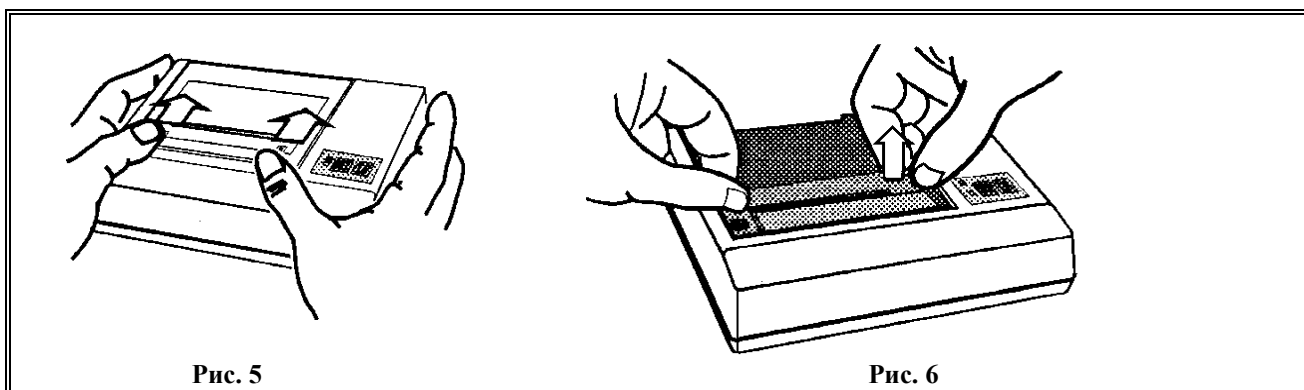

- Вставьте новую ленту начиная заправлять с левой стороны (рис. 7). Вставляйте ее до полного закрепления на месте. Убедитесь, что лента установлена правильно, а при необходимости подкрутите выступающую головку в направлении указанном стрелкой (рис. 8), чтобы подтянуть ленту.
- Подвиньте прозрачную крышку до тех пор пока она не займет свое место (рис. 3).
- Замените рулон бумаги таким образом, как описано в разделе 1.4.

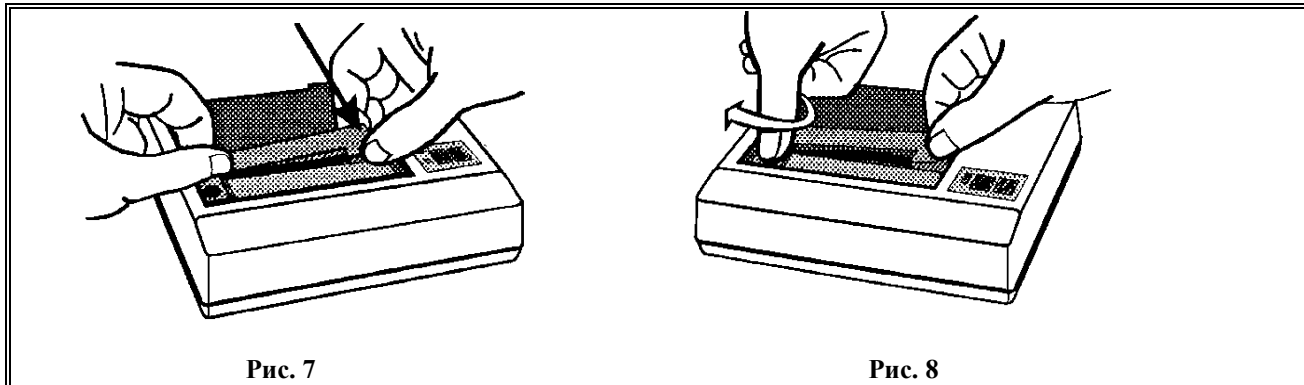

4 Аксессуары и расходные материалы

Пожалуйста, для эксплуатации принтера заказывайте расходные материалы и аксессуары у дилеров компании MELAG.

Заказывая расходные материалы всегда указывайте серийный номер Вашего принтера и используйте указанные артикулы MELAG для Ваших заказов.

Артикул:	Название:
41545	Бумага для принтера (5 рулонов)
41940	Лента для принтера