

Сухожаровой стерилизатор

«TAU STERIL 2000»

Инструкция по эксплуатации

**TAU STERIL di Bianchi Giancarlo e C.S.n.c.
Via Gorizia, 6/a - 22073 Fino Mornasco (Co), Italia
tel.: 0039- 31- 92.72.26, fax: 0039 - 31 - 88.07.34
e-mail: info@tausteril.com
www.tausteril.com**



либо прекращение услуг, утрату деловых возможностей, или предполагаемых прибылей.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия, не ухудшающие основные технические характеристики. вносить изменения в документацию и публикации, связанные с изделием, без необходимости ставить кого-либо в известность об этих изменениях и дополнениях.

9. СТАНДАРТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Внимание, прочитайте инструкцию по эксплуатации

Осторожно, опасность получить ожоги

Осторожно, опасность получить электрошок

Осторожно, наденьте защитные перчатки

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Стерилизатор TAU STERIL 2000	1 шт.
2.	Лоток	3 шт.
3.	Приспособление для извлечения лотков	1 шт.
4.	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
5.	Упаковка	1 шт.
6.	Заводской номер	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Одно из наиболее эффективных средств уничтожения даже самых устойчивых к высокой температуре бактерий посредством сухой стерилизации горячим воздухом. Данный стерилизатор мощный, полностью автоматический и гарантирует полную безопасность, т.к. создан в полном соответствии с Европейскими стандартами безопасности, подтвержденными Госстандартом Украины.



1.2. Прежде чем использовать аппарат, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1.3. При покупке аппарата обязательно проверяйте наличие и правильность заполнения гарантийного талона.

2. УСТРОЙСТВО СТЕРИЛИЗАТОРА

2.1. **Фронт и дверца** изготовлены из полностью эмалированной нержавеющей стали. Боковые и задняя стенки из листовой стали, покрыты эпоксидной краской.

2.2. **Стерилизационная камера** изготовлена из блестящей нержавеющей стали, отражает жар таким образом, что желаемая температура достигается очень быстро. Идеальное распределение тепла и значительная экономия электричества. Стерилизационная камера снабжена тремя полочками из италлюмака и щипцами.

2.3. **Изоляция:** Камера стерилизатора герметически закрывается (дверцей), герметичность достигается при помощи специальной силиконовой резины, особо выносливой и жаростойкой). Камера изолируется специальным стекловолоконистым прорезиненным материалом, препятствующими нагреванию корпуса.

2.4. **Термостат:** Автоматический с саморегуляцией от 90 до 200 °С, в соответствии с международными стандартами безопасности.

2.5. **Таймер (часы):** от 0 до 120 мин., автоматически регулирует время выключения термостата. Для цикла свыше 120 мин имеется возможность ручного управления.

2.6. **Термометр:** Капиллярный термометр служит для контроля внутренней температуры.

2.7. **Защита индикации:** В комплект индикации входят: предохранительный блок, выключатель со встроенной лампочкой, неоновые индикаторные лампочки для контроля за таймером и термостатом.

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Стерилизация происходит посредством обработки воздуха высокой температуры медицинского инструмента, находящегося в герметично закрытой камере. Температура стерилизации достигается с помощью электрических тонов, расположенных внутри камеры.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Откройте дверцу камеры стерилизатора

4.2. Поместите стерилизуемый инструментарий на одну из полок.

ВНИМАНИЕ! Запрещается помещать инструментарий на дно стерилизатора.

4.3. Закройте дверцу камеры. **ВНИМАНИЕ!** Следите за плотностью закрытия дверцы стерилизатора.

4.4. Включите стерилизатор выключателем ON\OFF. Задайте нужный температурный режим при помощи ручки таймера, в зависимости от стерилизуемого инструментария.

4.5. Переведите ручку таймера в крайнее левое положение (ручной режим Manual). Дождитесь, когда оранжевая индикаторная лампочка погасла, (стерилизатор достиг нужной температуры)

4.6. Переведите ручку переключения таймера по часовой стрелке на необходимое время стерилизации.

4.7. По истечении цикла стерилизации, дождитесь пока температура не упадет до значения 90-100 °С, после чего специальными щипцами извлеките поднос со стерильным инструментарием из камеры.

ВНИМАНИЕ! Инструмент горячий, остерегайтесь ожогов.

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внешние размеры, см: 44 x 38 x 31;

Размеры камеры, см: 37,5 x 20 x 23;

Объём, л: 20;

Масса в упаковке, кг:

Масса без упаковки, кг:

Потребляемая мощность, Вт: 600;

Характеристика сети: 230 В, 50 Гц;

Температура стерилизации, °С: до 200.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Аппарат следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С, с относительной влажностью воздуха 80% (при +25 °С), в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.

6.2. Содержите стерилизатор в чистоте. Обработка внешних поверхностей должна производиться в соответствии с действующими нормами и ГОСТами СЭС (42-21-2-85).

6.3. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.

6.4. Сервис и ремонт должны выполняться только квалифицированным сервисным персоналом.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Производитель гарантирует качество изделия, материалов и качество работы в течение **12 месяцев** с момента продажи, при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и хранения. На протяжении гарантийного срока изделия, определенные нами как дефектные, будут бесплатно отремонтированы либо, по нашему усмотрению, заменены.

7.2. Гарантия является недействительной в случае, если изделие было повреждено в результате аварии, неправильной эксплуатации, а также в случае ремонта или модификаций, произведенных лицами, не уполномоченными производителем. Изделие не является предметом какой-либо иной гарантии, оговоренной или подразумеваемой.

7.3. Аппараты, имеющие механические повреждения ремонту на условиях гарантии не подлежат.

7.4. Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специально уполномоченных сервисных службах. Доставка изделия в сервисную организацию для гарантийного или послегарантийного обслуживания осуществляется за счёт владельца изделия.

7.5. Изделие принимается в гарантийный ремонт только **при наличии гарантийного талона.**

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Производитель, его представители и дилеры не несут какой-либо ответственности перед потребителями и любыми другими физическими и юридическими лицами за любые возможные или действительные убытки, ущерб или повреждения, прямые или косвенные, причиненные оборудованием, проданным либо поставленным нами, или последовавшие в результате работы или использования оборудования, в том числе какое-