



NINGBO WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

Add: No.19, Lane 346, Changxing Road, Jiangbei District, Ningbo 315032, China.

Tel: +86-574-83022668

Fax: +86-574-87639376

Website: www.woson.com.cn



Паспорт изделия Мойка ультразвуковая. Серия CLEAN

Содержание

Рабочие условия:	2
Работа с изделием:	2
Технические характеристики:	2
Чистящие жидкости:	3
Предостережения:	3

Данное изделие предназначается, как правило, для чистки медицинских инструментов, но также может использоваться для чистки стекла, драгоценностей, золота, серебра, металаит.д.

Рабочие условия:

1. Напряжение: $220 \pm 10 \text{ В} / 50 \text{ Гц}$
2. Уровень чистящего раствора - $2/3$ от резервуара

Работа с изделием:


1. Для начала положите инструменты или другие предметы в корзину, добавьте воды и чистящий раствор не менее $2/3$ от объема резервуара. Пожалуйста, никогда не используйте чистящие компоненты с содержанием серной кислоты и щелочи.
2. Подключитесь к питанию и установите время работы, температуру, как минимум, выше на 5°C , обратите внимание на знак ▲, который значит увеличить, и ▼ – уменьшить. Как правило, время чистки 3-30 минут, а температура $30-60^\circ\text{C}$, конечно, вы можете настроить время и температуру по желанию, но температура не должна быть выше, чем 60°C .
3. Нажмите кнопку запуск, и устройство начнет цикл чистки при определенном звуковом сигнале. Если нажмете на кнопку запуска еще раз – цикл остановится. Обратите внимание, что между цифровыми дисплеями находится два световых индикатора. Красный означает, что идет чистка, зеленый – цикл остановлен.

Технические характеристики:

1. Установка времени цикла: от 0 до 99 минут
2. Температура: от 0 до 80°C
3. CLEAN25 (Объем – 2,5 л.): а) Вес – 2,5 кг; б) Размеры резервуара: $240 \times 140 \times 100$ мм (Д×Ш×В); в) 5 рабочих циклов; г) Материал резервуара: нержавеющая сталь SUS304.

CLEAN50 (Объем – 5 л.): а) Вес – 5 кг; б) Размеры резервуара: $240 \times 140 \times 150$ мм (Д×Ш×В); в) 5 рабочих циклов; г) Материал резервуара: нержавеющая сталь SUS304.

CLEAN100 (Объем – 10 л.): а) Вес – 10 кг; б) Размеры резервуара: $300 \times 240 \times 150$ мм (Д×Ш×В); в) 5 рабочих циклов; г) Материал резервуара: нержавеющая сталь SUS304.

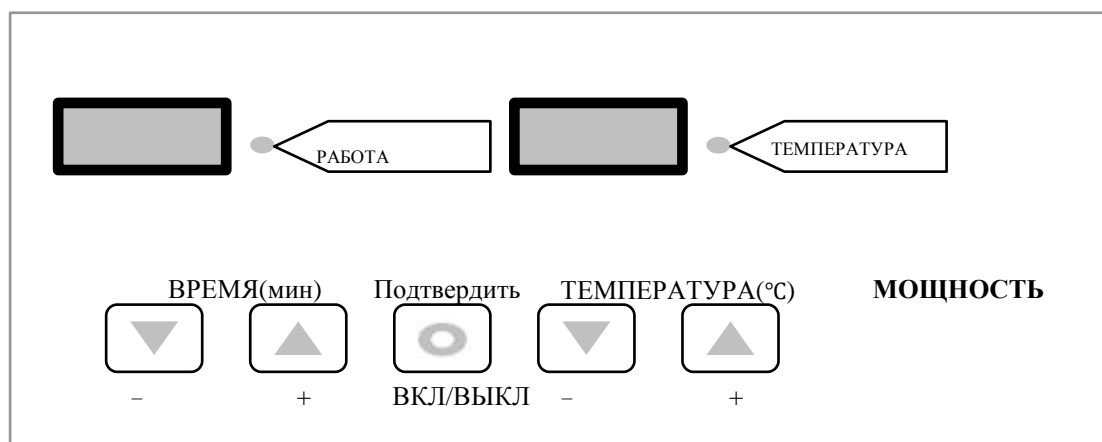

Чистящие жидкости, для ознакомления:

Пожалуйста, подберите подходящие чистящие компоненты по данным приведенным ниже:

Предмет	Чистящее средство	Допустимая концентрация
Мех.детали	Промышленноочистящее средство	5-10%
Металлические		
Оксид металла		
Ржавчина		
Цепь	Чистящее средство	5-10%
С глянцевой поверх.	Полировальный материал	5-10%
Электрокомпоненты	Чистящее средство для электродеталей	5-10%
Платы управления		
Оптика	Чистящее средство для стекла	5-10%
Стекло		
Магниты	Чистящее средство для магнитов	5-10%
Золото и серебро	Средство для ювелирных изд-ий	5-10%
Ювелирные		
Платина		

Предостережения:

Обязательно прочитайте данное руководство перед использованием.

Ни в коем случае не кладите инструменты непосредственно в ванну, а в корзину для инструментов.

Подача электричества должна быть заземлена.

Будьте очень осторожны при добавлении и очистке специальных средств.

Пожалуйста, не устанавливайте температуру выше 60°C.

Не работайте с изделием без воды в резервуаре.

Для корректного добавления особых чистящих средств, сначала отмеряйте необходимое количество.

Не добавляйте особые чистящие средства напрямую в резервуар.

В ваших интересах оставлять ванну чистой и сухой, после использования.